


Bedienung am sterilisierbaren Handgriff (sensoGrip)

Der sensoGrip ist ein Multifunktionshandgriff. Seine Mikroschalter reagieren auf Drehbewegungen, aber auch auf Bewegung nach oben oder unten. Einzelne Funktionen der Leuchten können durch Betätigen des sensoGrips in diesen vier Richtungen gesteuert werden.

Bei Betätigung ertönt ein akustisches Signal (doppelter Piepton) des sensoGrips.

Zur Aktivierung dieser Funktionen ist der sensoGrip zweimal in derselben Richtung zu betätigen. Danach besteht für 5 Sekunden die Möglichkeit, folgende Funktionen auszuführen:

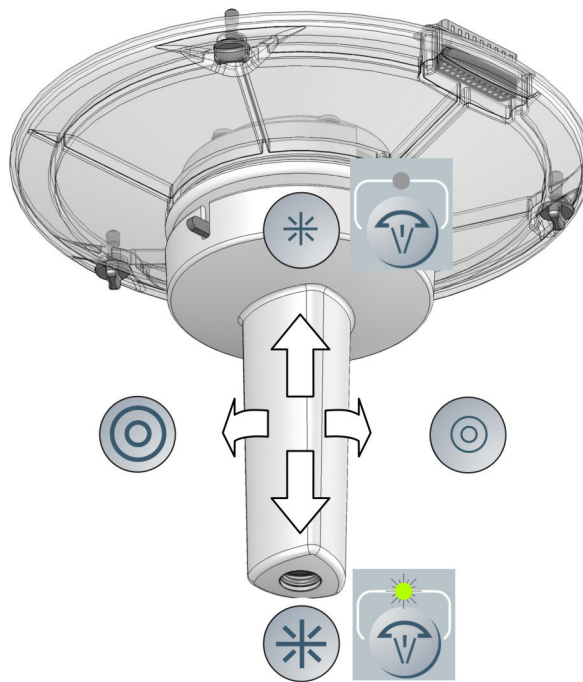

- LeuchtfeldEinstellung (Blick zum Handgriff)
 - Betätigen des Handgriffs **nach links** vergrößert das Leuchtfeld.
 - Betätigen des Handgriffs **nach rechts** verkleinert das Leuchtfeld.
- Beleuchtungsstärke (für Vario Modelle)
 - Betätigen des Handgriffs nach **unten** erhöht die Beleuchtungsstärke im OP-Feld.
 - Betätigen des Handgriffs nach **oben** reduziert die Beleuchtungsstärke im OP-Feld.
- Aktivierung des centriXbeam® (Modelle mit centriXbeam®)
 - Betätigen des Handgriffs nach **unten** aktiviert den centriXbeam®.
 - Betätigen des Handgriffs nach **oben** deaktiviert den centriXbeam®.